

Anaftin® szájöblítő

Az Anaftin® szájöblítő segít a szájbán megjelenő apró sérülések, például az aftás szájgyulladás és az aftás fekélyek, valamint a fogszabályzók és a rosszul illeszkedő fogpótlások miatt kialakuló apró sérülések okozta fájdalom kezelésében. Diffúz aftás fekélyek esetében is javallott.

Hatásmechanizmus:

Az Anaftin® szájöblítő polivinil-pirrolidont (PVP) és hialuronsavat tartalmaz, melyek védőfilmet képezve hozzátapadnak a szájüreghez, védelmet nyújtanak az érintett területeket érő mechanikai behatásokkal szemben, és enyhítik a szabad idegvégződésekben jelentkező fájdalmat. A készítmény hialuronsav és aloe vera tartalma segíti a sérült szövetek természetes gyógyulását.

Használati utasítás:

Töltse meg a mellékelt mérőkupakot a 10 ml-es jelig. Öblögesse a szájüregét legalább 1 percig, majd köpje ki a szájöblítőt. Használja napi 3-4 alkalommal, illetve szükség szerint. Az optimális eredmény érdekében az alkalmazás után legalább 1 óráig kerülje az evést és ivást. Véletlen lenyelése esetén nincs szükség semmilyen további intézkedésre.

Összetevők:

Víz, polivinil-pirrolidon (PVP), maltodextrin, propilén-glikol, *Aloe barbadensis*, hidroxietil-cellulóz, kálium-szorbát, nátrium-benzoát, PEG-40 hidrogénezett ricinusolaj, dinátrium-EDTA, benzalkónium-klorid, nátrium-hialuronát, aroma, nátrium-szacharinát, dikálium-glicirrizát

Figyelmeztetések:

Az Anaftin® szájöblítő használata ellenjavallt az összetevők bármelyikével szembeni ismert túlérzékenység esetén. Amennyiben Ön terhes, kérdezze meg orvosát a készítmény alkalmazása előtt. Ha gyakran előfordul Önnél szájüregi fekély, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz.

Óvintézkedések és figyelmeztetések:

Ne használja a lejárati időn túl, illetve ha a flakon sérültnek tűnik vagy szivárog. A készítmény gyermekektől elzárva tartandó! Szobahőmérsékleten, közvetlen hőhatástól védve tárolandó. Nem fagyasztható.

Tartalom:

120 ml

Gyártó:

Sinclair Pharma Srl,
Viale Restelli 5,
20124 Milánó, Olaszország



Orvostechnikai eszköz

Forgalmazó:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Németország

Felülvizsgálat dátuma: 2014. október