

# Anaftin<sup>®</sup> gél

Az Anaftin<sup>®</sup> gél segít a szájbán megjelenő apró sérülések, például az aftás szájgyulladás és az aftás fekélyek, valamint a fogszabályzók és a rosszul illeszkedő fogpótlások miatt kialakuló apró sérülések okozta fájdalom kezelésében. Diffúz aftás fekélyek esetében is javallott.

## Hatásmechanizmus:

Az Anaftin<sup>®</sup> gél polivinil-pirrolidont (PVP) és hialuronsavat tartalmaz, melyek védőfilmet képezve hozzátapadnak a szájüreghez, védelmet nyújtanak az érintett területeket érő mechanikai behatásokkal szemben, és enyhítik a szabad idegvégződéseken jelentkező fájdalmat. A készítmény hialuronsav és aloe vera tartalma segíti a sérült szövetek természetes gyógyulását.

## Használati utasítás:

Vigyen fel 1 vagy 2 csepp gélt a szájüregi fekély vagy sérülés teljes lefedéséhez. Kerülje a közvetlen érintkezést az applikátor és a sérülés között. A védőfilm akadálytalan kialakulása érdekében legalább 2 percig ne érintse meg a nyelvvel a sérülést. Használat után mindig vissza kell helyezni a kupakot. Az optimális eredmény érdekében a felvitel után legalább 1 óráig kerülje az evést és ivást.

Használja napi 3-4 alkalommal, illetve ha szükséges, ennél többször.

## Összetevők:

Víz, polivinil-pirrolidon (PVP), maltodextrin, propilén-glikol, PEG-40 hidrogénezett ricinusolaj, xantán gumi, kálium-szorbát, nátrium-benzoát, nátrium-hialuronát, aroma,

benzalkónium-klorid, dinátrium-EDTA, nátrium-szacharinát, dikálium-glicirrizát, Aloe barbadensis

## Figyelmeztetések:

Az applikátor és a gél keresztszennyezésének elkerülése érdekében az Anaftin<sup>®</sup> gél tumbust csak egy beteg használhatja. Az Anaftin<sup>®</sup> gél használata ellenjavallt az összetevők bármelyikével szembeni ismert túlérzékenység esetén. Amennyiben Ön terhes, kérdezze meg orvosát a készítmény alkalmazása előtt. Ha gyakran előfordul Önnél szájüregi fekély, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz.

## Óvintézkedések és figyelmeztetések:

Ne használja a lejárati időn túl, illetve ha a tubus sérültnek tűnik vagy szivárog. A készítmény gyermekektől elzárva tartandó! Szobahőmérsékleten, közvetlen hőhatástól védve tárolandó. Nem fagyasztható.

## Tartalom:

8 ml

## Gyártó:

Alliance Pharma Srl,  
Viale Restelli 5,  
20124 Milánó, Olaszország



Orvostechnikai eszköz

## Forgalmazó:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),  
Glienicke Weg 125,  
12489 Berlin, Németország

## Felülvizsgálat dátuma:

**2016. szeptember**