

Anaftin[®] Baby fogínygél

Az Anaftin[®] fogínygél bioadhezív gél szájüregben történő alkalmazásra. Rövid idő alatt láthatatlan filmet képez, amely megvédi az ínyt a kellemetlen érzéstől és a fájdalomtól. Természetes összetevői révén segít csökkenteni az érintett területek fájdalmát és a kipirulást. Az applikátor szilikonszájai finoman masszírozzák az ínyt, ezáltal enyhítik a fogzással járó kellemetlen érzést és egyéb tüneteket.



Az Anaftin[®] Baby fogínygél nem tartalmaz helyi érzéstelenítőt vagy más gyógyszert, alkoholt és cukrot.

Az Anaftin[®] Baby fogínygél nem okoz égő érzést alkalmazás közben és kellemes banán ízesítésű.

Használati utasítás:

Alkalmazzon kellő mennyiségű gélt az érintett terület lefedéséhez, majd finoman masszírozza az ínyt az applikátorral.

A gélt ajánlott étkezések után és alvás előtt alkalmazni, mert ez elősegíti a filmképződést és tartósan enyhíti a baba fájdalmát. Használja olyan gyakran, ahogy szükséges. A csavaros kupakot minden használat után vissza kell helyezni. A gél újabb alkalmazását akadályozó esetleges termékmaradványokat el kell távolítani.

Összetevők:

Víz, polivinil-pirrolidon (PVP), propilén-glikol, PEG-40 hidrogénezett ricinusolaj, *Aloe barbadensis*, xantán gumi, aroma, kálium-szorbát, nátrium-benzoát, dinátrium-EDTA, nátrium-hialuronát, xilitol, cetilpiridinium-klorid, glicirretinsav, *Crocus sativus*

Figyelmeztetések:

Az applikátor és a gél keresztszennyezésének elkerülése érdekében az Anaftin[®] Baby fogínygél tubust csak egy beteg használhatja. Az Anaftin[®] Baby fogínygél használata ellenjavallt az összetevők bármelyikével szembeni ismert túlérzékenység esetén. Amennyiben Ön terhes, kérdezze meg orvosát a készítmény alkalmazása előtt.

Óvintézkedések és figyelmeztetések:

FIGYELEM:

A terméket csak felnőtt alkalmazhatja a gyermeknél.

Ez az orvostechnikai eszköz nem játék! SOHA ne adja gyermek kezébe. Fulladási kockázat!

Használat előtt ellenőrizze az orvostechnikai eszköz épségét, és a gél alkalmazása közben ügyeljen arra, hogy az applikátorfej részei ne válhassanak le véletlenül. Ha ez mégis megtörténik, ne használja tovább az applikátort.


Ne próbálja visszahelyezni a levált részt.

Ha a gél elfogy, ne használja tovább az eszközt.

Ne használja a lejáratú időn túl, illetve ha a tubus sérültnek tűnik vagy szivárog. Szobahőmérsékleten, közvetlen hőhatástól védve tárolandó.

Nem fagyasztható.

A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!

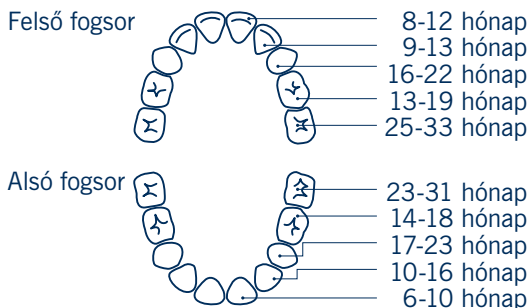

Tartalom:

10 ml

Gyártó:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5, 20124 Milánó, Olaszország

Orvostechnikai eszköz

Forgalmazó:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Németország

Felülvizsgálat dátuma: 2016. szeptember

